

2015年改訂版

COSMETIC GLOVES



SATO GIKEN

COSMETIC GLOVES

目次

C	O	N	T	E	N	T	S
1.装飾用肩義手	1-92、1-93 カラーグローブ肩義手	1-52、カラーグローブ肩部分のみ	1-0Xノーマルグローブ肩部分のみ				①
2.装飾用上腕義手	2-92、2-93 カラーグローブ上腕義手	2-52 カラーグローブ前・上腕部分のみ	2-3、2-4 ノーマルグローブ上腕義手				②
3.装飾用前腕部付手掌	3-92、3-93、3-92X、3-93X カラーグローブ前腕部付手掌	3-2、3-3、3-2X、3-3X ノーマルグローブ前腕部付手掌	3-52 カラーグローブ前腕部分のみ				③
4.装飾用手部義手	4-91~4-93、4-91X~4-93X カラーグローブ手袋式	4-1~4-3、4-1X~4-3X ノーマルグローブ手袋式	4-94~4-96、4-94X~4-96X カラーグローブ半手部式	4-4~4-6、4-4X~4-6X ノーマルグローブ半手部式	4-8P1~4-8P5	パッシブフィンガーインナー	④⑤
5.装飾用手先義手	5-9、5-92、5-9X、5-92X カラーグローブ手掌	5-2~5-5、5-2X~5-5X、5-8G、5-8GX ノーマルグローブ手掌	5-8P、5-8S	パッシブハンドインナー			⑥
6.装飾用手指義手	6-91、6-91X カラーキャップ	6-1、6-1X ノーマルキャップ					⑦
7.ハンド型能動義手	7-2 ハンド型能動手掌、7-3 ハンド型能動用ノーマルグローブ						⑦
8.装飾用義足	8-1~8-5 エンビソックス	8-40 シルソックス、820 抗菌インソール入りシルソックス					⑧⑨⑩
シリコン装飾用義足							
9.シリコン製品	5-44、5-44S、5-44R、5-44RS、5-44W、5-44WS、5-40、	4-45 シルグローブ、2-452、3-452	シリコン製カバー	シルキャップ、オーダーメイドシルグローブ			⑪
10.装飾用 肘継手							⑫⑬
11.装飾用義肢付属品	指芯、マジック取付、軟性発泡樹脂、軟性塩ビソケット、軟性シリコンソケット、	ポリソケット加工、前腕部分ポリ支持部加工、上腕部分ポリ支持部加工、	アルギン酸塩印象剤・アルギン酸塩印象剤用採型ケース、ポリエチレンボウル(L・M・S)、	エンビボウル(L・M・S)、シリコンボウル、メディカル粘着剤、P.Oクリーナー			⑭⑮
シルグローブ仕様一覧表							⑯⑰
サイズ一覧表							⑱⑲



..... 完成用部品価格表に掲載名

Xコート加工済 Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

グローブの種類

● ノーマルグローブ 塩化ビニール製/単色タイプ

厚みや堅さを変えることが出来るスタンダードタイプ。一番丈夫である。材料の特色を生かし2次加工が容易である。



● カラーグローブ 塩化ビニール製/リアルカラータイプ

2層構造で着色してあるリアルなタイプ。材料の特色を生かし2次加工が容易である。



● シルグローブ シリコン製/リアルカラータイプ

汚れが付きにくく変質、変色も少ない非常にリアルなタイプ。装着感が良く肌にやさしい。




1 装飾用肩義手

1-92 カラーグローブ肩義手

〈回転(外回転・内回転)もしくは、木部付〉

肩までカラーグローブ塩ビ製で、手首に回転器もしくは、木部が付きます。

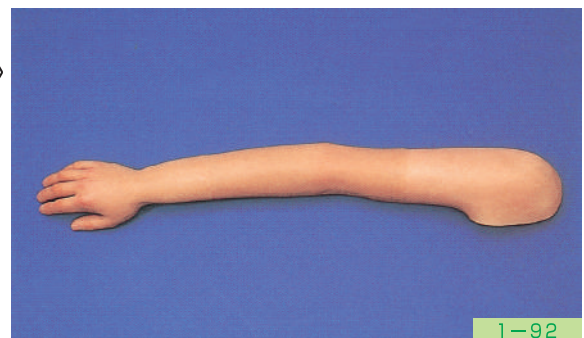

1-92

1-93 カラーグローブ肩義手

〈回転なし〉




1-52

1-52 カラーグローブ肩部分のみ

1-0X ノーマルグローブ肩部分のみ

Xコート加工済

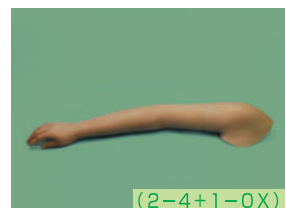

(2-4+1-0X)


2 装飾用上腕義手

2-92 カラーグローブ上腕義手


〈回転付（外回転・内回転）もしくは、木部付〉
上腕部分までカラーグローブ塩ビ製で、手首に回転器もしくは、木部が付きます。

2-93 カラーグローブ上腕義手

〈回転なし〉

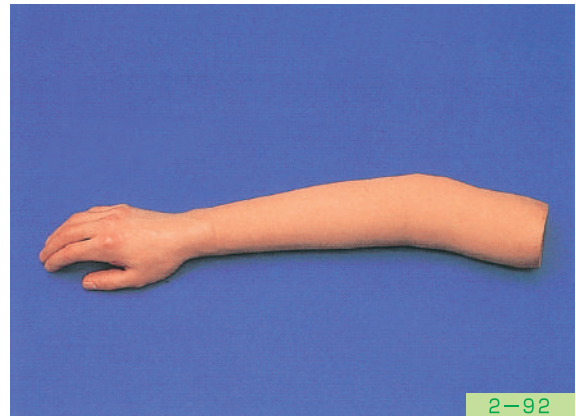

2-52 カラーグローブ前・上腕部分のみ

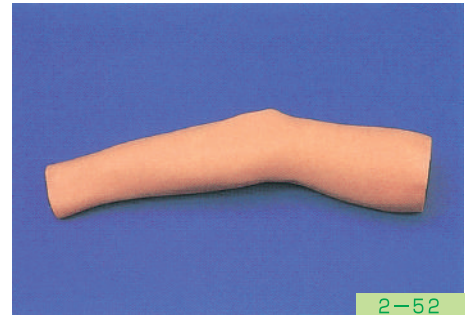


2-3 ノーマルグローブ上腕義手

〈回転付（外回転・内回転）〉

上腕部分までノーマルグローブ塩ビ製で手首に回転器が付きます。

2-4 ノーマルグローブ上腕義手

〈回転なし〉

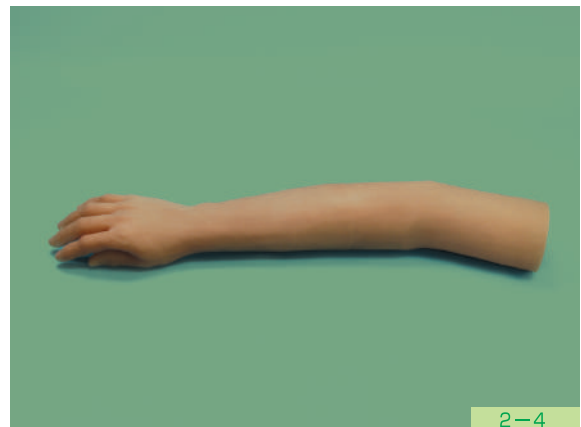


..... 完成用部品価格表に掲載名

Xコート加工済 Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

3 装飾用前腕部付手掌

3-92 カラーグローブ前腕部付手掌
 〈回転付(外回転・内回転)もしくは、木部付〉
 前腕までカラーグローブ塩ビ製で、手首に回転器もしくは木部がつきます。内回転、外回転どちらでもできますのでご指示ください。

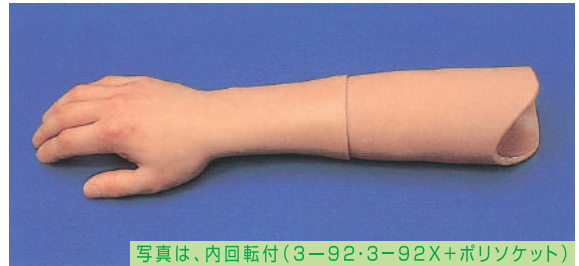


写真は、内回転付(3-92・3-92X+ポリソケット)

3-92X カラーグローブ前腕部付手掌
 〈回転付(外回転・内回転)もしくは、木部付〉
Xコート加工済

3-93 カラーグローブ前腕部付手掌
 〈回転なし〉

3-93X カラーグローブ前腕部付手掌
 〈回転なし〉
Xコート加工済

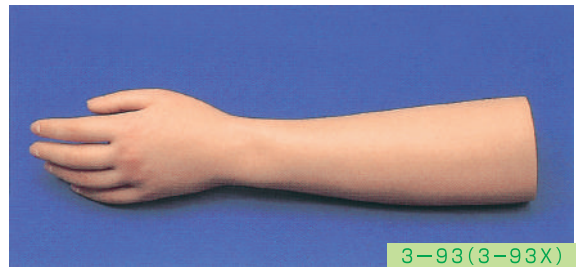


3-93(3-93X)

3-52 カラーグローブ前腕部分のみ

3-2 ノーマルグローブ前腕部付手掌
 〈回転付(外回転・内回転)〉


3-2X ノーマルグローブ前腕部付手掌
 〈回転付(外回転・内回転)〉
Xコート加工済

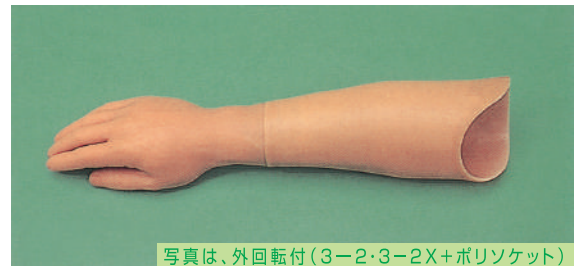

写真は、外回転付(3-2・3-2X+ポリソケット)

3-3 ノーマルグローブ前腕部付手掌
 〈回転なし〉

3-3X ノーマルグローブ前腕部付手掌
 〈回転なし〉
Xコート加工済

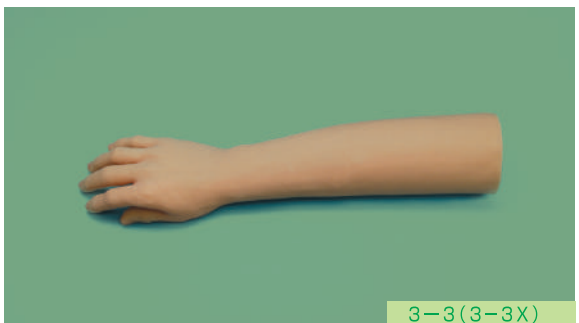

3-3(3-3X)

Xコート加工済

完成用部品価格表に掲載名

Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

4 装飾用手部義手

装飾用手袋式、半手部式には、仕様書（型紙、モデル）によるカット代は含まれていますが、指芯、マジック、軟性発泡樹脂その他の加工代は含まれていません。

4-91 カラーグローブ手袋式 〈4本指・5本指用〉

4-91X カラーグローブ手袋式 〈4本指・5本指用〉 Xコート加工済

4-92 カラーグローブ手袋式 〈2本指・3本指用〉

4-92X カラーグローブ手袋式 〈2本指・3本指用〉 Xコート加工済

4-93 カラーグローブ手袋式 〈1本指用〉

4-93X カラーグローブ手袋式 〈1本指用〉 Xコート加工済

4-94 カラーグローブ半手部式 〈4本指・5本指用〉

4-94X カラーグローブ半手部式 〈4本指・5本指用〉 Xコート加工済

4-95 カラーグローブ半手部式 〈2本指・3本指用〉

4-95X カラーグローブ半手部式 〈2本指・3本指用〉 Xコート加工済

4-96 カラーグローブ半手部式 〈1本指用〉

4-96X カラーグローブ半手部式 〈1本指用〉 Xコート加工済

4-1 ノーマルグローブ手袋式 〈4本指・5本指用〉


4-1X ノーマルグローブ手袋式 〈4本指・5本指用〉 Xコート加工済

4-2 ノーマルグローブ手袋式 〈2本指・3本指用〉

4-2X ノーマルグローブ手袋式 〈2本指・3本指用〉 Xコート加工済

4-3 ノーマルグローブ手袋式 〈1本指用〉


4-3X ノーマルグローブ手袋式 〈1本指用〉 Xコート加工済

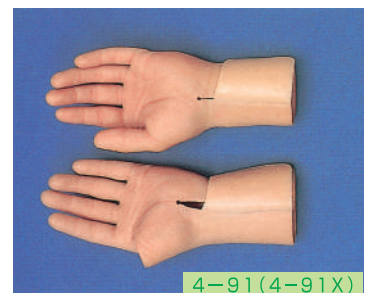

4-91(4-91X)



4-92(4-92X)

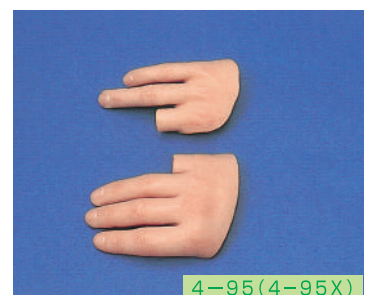

4-95(4-95X)



4-3(4-3X)

..... 完成用部品価格表に掲載名

Xコート加工済 Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

4-4 ノーマルグローブ半手部式 〈4本指・5本指用〉

4-4X ノーマルグローブ半手部式 〈4本指・5本指用〉

Xコート加工済

4-5 ノーマルグローブ半手部式 〈2本指・3本指用〉


4-5X ノーマルグローブ半手部式 〈2本指・3本指用〉

Xコート加工済


4-6 ノーマルグローブ半手部式 〈1本指用〉

4-6X ノーマルグローブ半手部式 〈1本指用〉

Xコート加工済

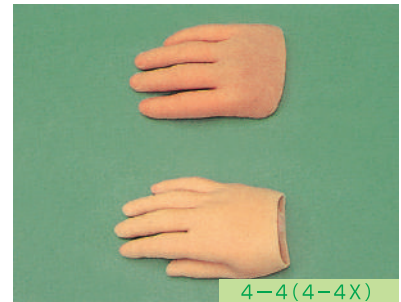

4-4 (4-4X)

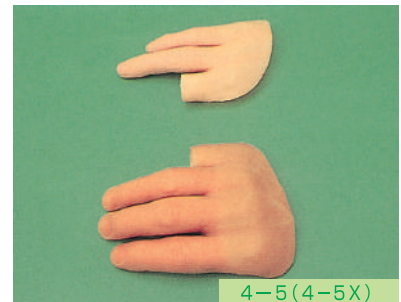

4-5 (4-5X)

パッシブフィンガーインナー

パッシブハンドのフィンガータイプで他動的に、D.I.P、P.I.P、M.P関節が動かせます。通常手袋式・半手部式に内蔵し、断端末は患部に合わせて軟性発泡樹脂形成(別料金)します。

注……●MP関節より遠位部切断には使用できません。 ●患肢モデルが必要です。

4-8P1 パッシブフィンガーインナー

〈1本指用〉

4-8P2 パッシブフィンガーインナー

〈2本指用〉

4-8P3 パッシブフィンガーインナー

〈3本指用〉

4-8P4 パッシブフィンガーインナー

〈4本指用〉

4-8P5 パッシブフィンガーインナー

〈5本指用〉



4-8P1



4-8P3



4-8P5

4-91~4-96、4-91X~4-96X及び4-1~4-6、4-1X~4-6X、4-45、5-40シルグローブと組み合わせられます。



..... 完成用部品価格表に掲載名

Xコート加工済

Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

5 装飾用手先義手

5-9 カラーグローブ手掌 〈グローブのみ〉

5-9X カラーグローブ手掌 〈グローブのみ〉 **Xコート加工済**

5-92 カラーグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)もしくは木部付〉

5-92X カラーグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)もしくは木部付〉

5-2 ノーマルグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)〉

Xコート加工済

5-2X ノーマルグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)〉 **Xコート加工済**

5-3 ノーマルグローブ手掌 〈回転なし・指芯入り〉

5-3X ノーマルグローブ手掌 〈回転なし・指芯入り〉 **Xコート加工済**

5-4 ノーマルグローブ手掌 〈グローブのみ〉



5-4X ノーマルグローブ手掌 〈グローブのみ〉 **Xコート加工済**

5-5 ノーマルグローブ手掌 〈木部付・骨格式用〉

5-5X ノーマルグローブ手掌 〈木部付・骨格式用〉 **Xコート加工済**

5-8G ノーマルグローブ手掌 〈パッシブハンド用〉

5-8GX ノーマルグローブ手掌 〈パッシブハンド用〉 **Xコート加工済**

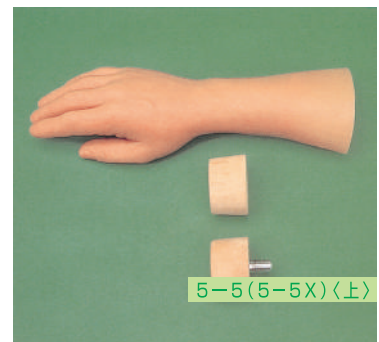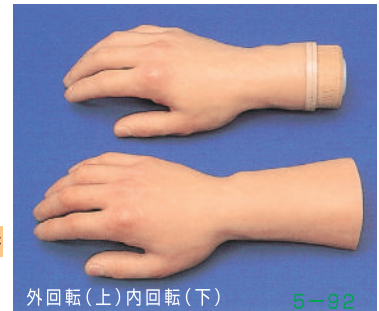

◎古い義手との取り換えの場合は交換料をいただきます。

回転器について



プレート式

標準はプレート式になります。

従来のタイプでソケット側の底のプレートを木ネジで固定します。一体で取り外します。



ネジプレートについて

9-18 ネジプレート

ネジ部ピッチは、M12 P1.25、M12 P1.5、M12 P1.75、1/2インチ20山があります。

(※シルバー：M12 P1.5のみメネジ付プレート有)



..... 完成用部品価格表に掲載名


Xコート加工済

Xコートとは、塩ビ製品の表面に特殊樹脂を硬化させ、被膜を作る新しい汚れ防止加工です。新規製作時にご注文ください。

5-8P パッシブハンドインナー

他動的に動かせる指関節付です。手首の回転付、木部付、又は相方なしの御指定下さい。

シルグローブ(5-44)、カラーグローブ(5-9・5-9X)との組み合わせで、よりリアルな手掌になります。

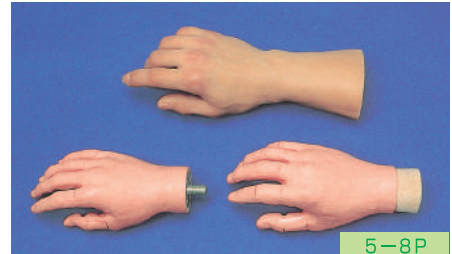


5-8P

5-8S パッシブハンドインナー

従来のパッシブハンドインナーの手関節に掌、背屈機能と回内、回外可動域に180度の制限を追加した新しい製品です。

シルグローブ(5-44)、カラーグローブ(5-9・5-9X)との組み合わせで、よりリアルな手掌になります。

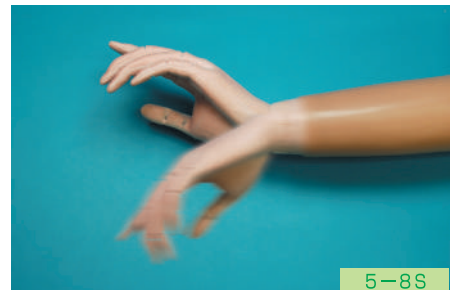

5-8S


6 装飾用手指義手

6-91 カラーキャップ 〈差込式〉

6-91X カラーキャップ 〈差込式〉 Xコート加工済

6-1 ノーマルキャップ 〈差込式〉

6-1X ノーマルキャップ 〈差込式〉 Xコート加工済

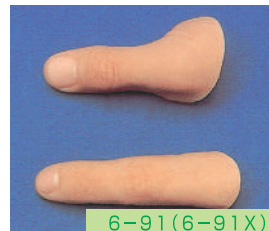

6-91(6-91X)



6-1(6-1X)

7 ハンド型能動義手

7-2 ハンド型能動手掌 〈インナーのみ〉

手先は堅固なプラスチック製で、手首にプラスチック製又はアルミ製の回転器、又は骨格式用ボルトが付き、回内・回外ができます。ワイヤーなしでもできます。

7-3 ハンド型能動用ノーマルグローブ

能動用カラーグローブ(5-9)、能動用シルグローブ(5-44)もあります。



7-2+7-3



7-2



7-3

8 装飾用義足

※ノーマルグローブのみの製品です。


8-1 足袋式 〈4本指・5本指用〉
かかとを抜いて後部ベルト状にもできます。

8-2 足袋式 〈3本指以下用〉
かかとを抜いて後部ベルト状にもできます。

8-3 下腿リアルカバー
足先から膝上までの塩ビ製義足カバーです。

8-4 下腿指無しリアルカバー
足先が指の形状無しの塩ビ製義足カバーです。

8-5 足先リアルソックス
足首上までの塩ビ製義足カバーです。

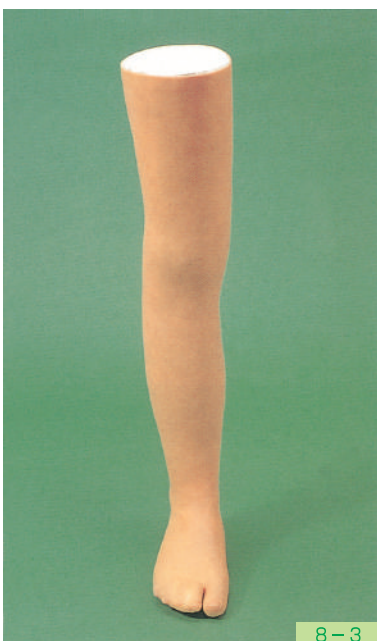

8 シリコン製品

注……●以下の製品は、必ず仮合わせが必要です。

シリコン装飾用義足

8-40 シルソックス

シリコン製の装飾足袋式義足です。軟性発泡樹脂、防水加工が含まれています。



- 適度な軟性シリコン製なので、素足に直接装着しても、はきごちが良く圧迫感が少ないです。
- 外観が非常にリアルであり、また、防水加工されているので、夏季等、足部露出の場面で使用が出来ます。
- 足底部に適度な弾性繊維で補強してあるので歩行しやすい。
- 内部も洗剤で水洗いが出来るので衛生的です。
- ショパールより遠位側欠損の方にご利用頂けます。



※様々なカットラインに対応致します。



820 抗菌インソール入りシルソックス

抗菌インソール入りのシリコン製の装飾足袋式義足です。



シルソックス ご注文について

〈必要事項〉

- 患側石膏モデル
- 各部周径が記入された患側、健側トレース図
- 色指定

測定用紙等に以下のように記入して頂くようお願いします。

〈記入例〉

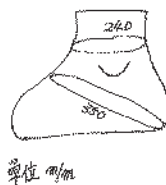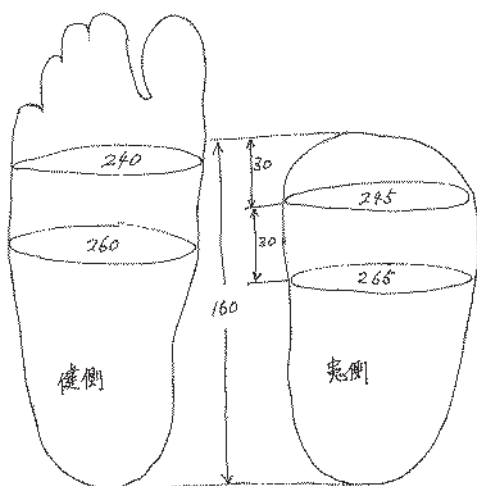

〈患者様データ〉

- ★記入日 2010.01.01
- ★氏名 佐藤 ○○
- ★左右 右
- ★切断部位 リスフラン
- ★健側足長 240mm
- ★性別 男
- ★色 No.6

以下仕様について、

- くるぶしまでの足袋式タイプ
マジック無し。
- カットラインはモデルにマークしてある。
- 足底をやや硬くしてください。
- 20代男性で営業職、休日は活動的で
スポーツなどをする。

● 仮合わせ

仮合わせ時には、シリコン製チェックソケットをご用意致しますので、フィッティング、アライメント、足長等のチェックをお願いします。

※シルソックス(シリコン製)は完成後の製品のサイズ直しは、出来ませんので、オーダー時に上記の情報を必ずご提供お願い致します。



完成用部品価格表に掲載名

スムーズコート済

スムーズコートとは、シリコン製品に、背側面の滑りを良くする特殊な表面加工を施した製品になります。シリコンの表面摩擦が軽減され衣服を着る時、袖を通しやすくなります。

9 シリコン製品

シルグローブの特長は、汚れが付かない事です。又、成分が安定していますので変質、変色も少なく装着感も良好です。

5-44 シルグローブ手掌 〈グローブのみ〉

5-44S シルグローブ手掌 〈グローブのみ〉 **スムーズコート済**

パッシブハンドインナー 5-8P又は5-8S
ハンド型能動手掌 7-2を入れられます。

5-44R シルグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)〉

5-44RS シルグローブ手掌 〈回転付(外回転・内回転)〉 **スムーズコート済**
(指芯入、軟性発泡樹脂入)

5-44W シルグローブ手掌 〈木部付〉

5-44WS シルグローブ手掌 〈木部付〉 **スムーズコート済**

(指芯入、軟性発泡樹脂入)
各ピッチに合うボルトを取り付けられます。(別料金)

5-40 シルグローブ差込式手掌

(指芯入、軟性発泡樹脂入、シリコンインナーソケット付)
手関節離断レベルの差込式手掌、患部周径に合わせ加工します。

4-45 シルグローブ全指手袋式

(指芯入、軟性発泡樹脂入、シリコンインナーソケット付)
手関節離断レベルの手袋式義手、マジック付 患部周径に合わせ加工します。

2-452 シリコン製カバー 〈前、上腕部分〉

5-44、5-44S、5-44R、5-44RS、5-44W、5-44WS、5-40に接着出来ます。

3-452 シリコン製カバー 〈前腕部分〉

5-44、5-44S、5-44R、5-44RS、5-44W、5-44WS、5-40に接着出来ます。

シルキヤップ 超リアルなオーダーメイドシリコン製義指です。

差込式キャップで、10mmぐらいの短断端でも吸着式で使用できます。
完成用部品価格表には掲載されていません。


オーダーメイドシルグローブ手袋式

オーダーメイドシルグローブ半手部分式


オーダーメイドシルグローブ足部

複雑な患部形状

手部義手で断端が大きく、手首より遠位切断の場合はフルオーダーになり金額が上がります。完成用部品価格表には掲載されていません。

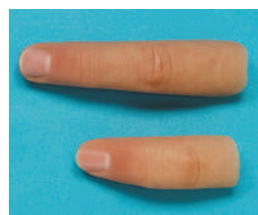

その他補綴物等に関しましては担当者までご相談ください。

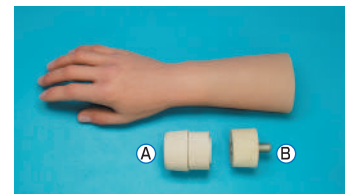

5-44RはⒶの回転器(内回転)が内蔵、
5-44WはⒷの木部が内蔵されます。



上 5-40 下 4-45



上 2-452 下 3-452



5-44R+3-452

10 装飾用 肘継手

9-88 フリーライトセット

〈骨格構造義手肘継手 ネジプレート以外が揃ったセットの品番です。〉

9-88-1 リストコネクタ

〈フリーライト用部品 手先具とパイプを接続する部品だけの品番です。〉

9-88-2 ソケットホルダ

〈フリーライト用部品 ラミネーションソケットに使用するホルダだけの品番です。〉



長断端対応面摩擦式肘継手

〈前腕・上腕回旋機能付き〉

短断端から長断端まで対応する装飾用肘継手です。



〈前腕部・上腕部パイプ、ソケットホルダ、リストコネクタ付き〉

- ★軽量です。
- ★肘関節のロック機能はなく面摩擦の調整により、屈曲、伸展抵抗を自由に選択出来ます。
- ★上腕ソケットホルダが肘関節屈曲軸中心ボルトに取り付けられるため、距離が短く、上腕長断端患部への装着が可能です。



肘継手重量が他社平均約150gに対して
フリーライト肘継手は105g！約30%軽量！




肘継手屈曲軸の中を取り付けボルトが通るため
ソケットホルダと直接接続出来る。
長断端でも健側に近くセッティング出来る！

フリーライトセット(骨格構造肘継手)

特徴

本製品はフリーの肘屈曲・伸展機構で、摩擦力調整により、屈曲・伸展抵抗が任意に変えられます。ロック機能はありません。又、上腕長断端から短断端まで幅広く御使用頂けます。

完成用部品等の指定基準「佐藤 9-88」 <ネジプレート以外が揃ったセットの品番です。>

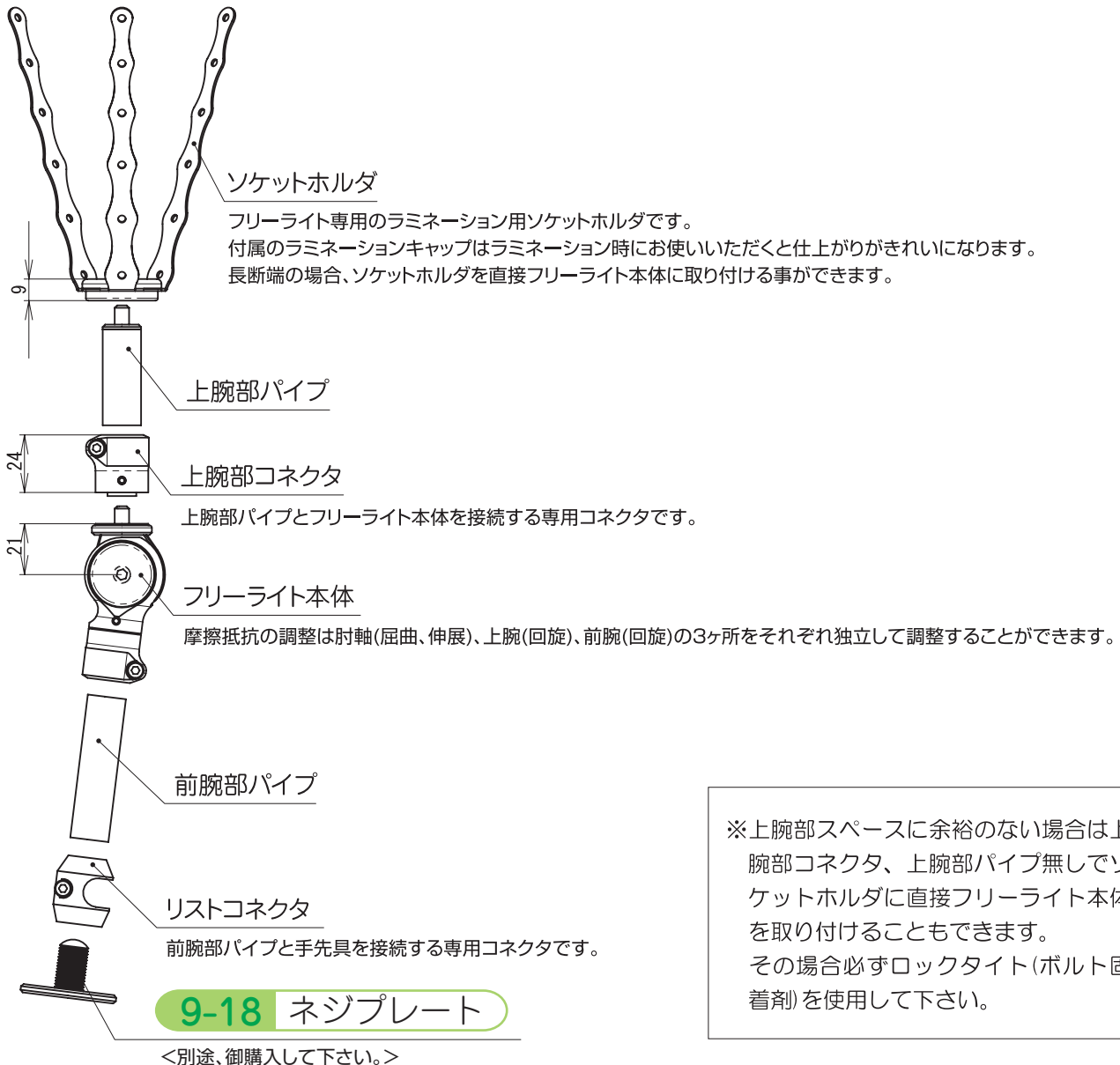

※上腕部スペースに余裕のない場合は上腕部コネクタ、上腕部パイプ無しでソケットホルダに直接フリーライト本体を取り付けることもできます。その場合必ずロックタイト(ボルト固着剤)を使用して下さい。

11 装飾用義肢付属品

指芯



〈ステンレス製〉

マジック取付 (1ヶ所につき)

軟性発泡樹脂

半硬質及び軟質のスポンジで、当社で流し込み形成します。
患部モデルが必要です。

※軟性発泡樹脂は流し込む部位によって価格が変わります。

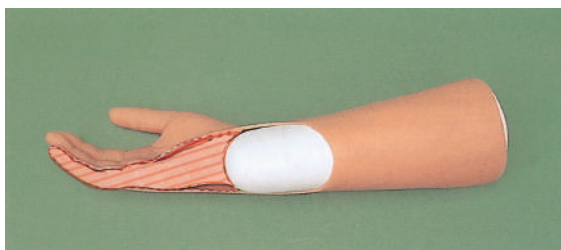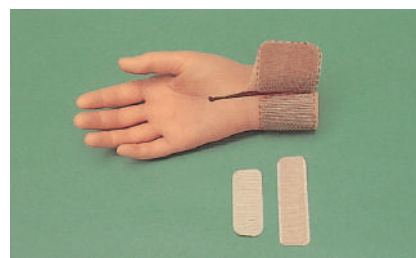

内に軟性発泡樹脂充填済み



軟性塩ビソケット

熱可塑性樹脂ソケットで、患部とトータルコンタクトで製作でき、
義手内部への防水、補強ができます。塩ビの厚みと硬度が調節
できます。修正済患肢モデルが必要です。

軟性シリコンソケット



ポリソケット加工

ポリソケット加工

〈ミュンスター・ノースウェスタン〉


ポリエチレン等熱可塑性樹脂を使用し、様々なソケットを製作で
きます。修正済患肢モデルが必要です。
熱硬化性樹脂ソケットの製作も承ります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。



前腕部分ポリ支持部加工

上腕部分ポリ支持部加工

ポリエチレン製で、中・短断端のソケットと手首とを継ぎ、回転器、木部の支持及び義肢の前腕部分の強化、軽量化ができます。上腕部分のソケットと肘継ぎ手の連結にも使用できます。

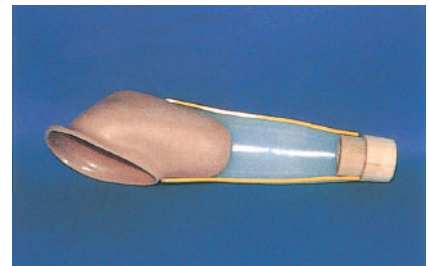

アルギン酸塩印象剤

ギプス包帯で採型しにくい指や、複雑な形状の患部(手部、顔面等)の採型、陽性モデルのコピーなどに適しています。



アルギン酸塩印象剤用採型ケース

アルギン酸塩印象剤で手部の採型の時に使用します。指用もご用意できます。

ポリエチレンボウル (L・M・S)

アルギン酸塩印象剤を練る時に適しています。
やや硬質で離型性がよく「アルギン酸塩印象剤」がくっつきにくい。

- L …… 直径 約27cm
- M …… 直径 約21cm
- S …… 直径 約20cm



エンピボウル (L・M・S)

石膏を練る時に適しています。
柔軟であるので硬化した石膏が離型しやすい。

- L …… 直径 約18cm
- M …… 直径 約14cm
- S …… 直径 約12cm



シリコーンボウル

直径 約16cm

メディカル粘着剤

低刺激で安全性の高い医療用シリコーン使用
極短断端の手指義手や垂直面の補綴物(耳等)を装着する時
使用します。



P.Oクリーナー

天然素材で除菌効果があり、柑橘系のさわやかな香りが、防臭にも役立つ義肢用クリーナーです。


COSMETIC GLOVES

スムーズコート付の場合は、佐藤5-44→佐藤5-44S、
佐藤5-44R→佐藤5-44RS、佐藤5-44W→佐藤5-44WSに
それぞれ変更して下さい。




シルグローブ仕様一覧表

完成用部品価格表掲載品

リアルで汚れず、皮膚にやさしいシルグローブ(装飾用シリコン義手)は手部切断から、上腕切断までの様々な切断部位に対応できます。下記の図等をご参照の上、お見積りの参考として下さい。

製品番号	佐藤 5-44	製品名	シルグローブ	内容	グローブのみ
仕様	ハードソケット用グローブ				
見積例	パッシブハンド入りの場合：佐藤5-44+佐藤5-8P 能動義手の場合：佐藤5-44+佐藤7-2				





手関節回転あり

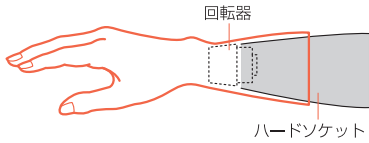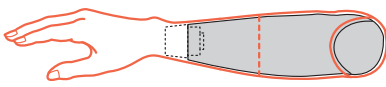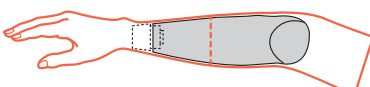製品番号	佐藤 5-44R	製品名	シルグローブ 回転器付手掌	内容	指芯入り、軟性発泡樹脂入、手関節回転器付
仕様	ハードソケット用関節回転器付手掌		ハードソケット用回転器付前腕部付手掌	ハードソケット用回転器付上腕部付手掌	
見積例	佐藤5-44R		佐藤5-44R+佐藤3-452	佐藤5-44R+佐藤2-452	
参考図					



※短断端ソケットの場合、当社でポリエチレン製支持部を付ける事もできます。

※パッシブハンド入り前腕部付きの場合：佐藤5-44+佐藤5-8P+佐藤3-452 回転器はパッシブハンドに含まれています。


手関節回転なし

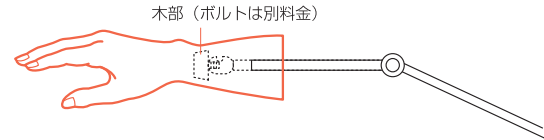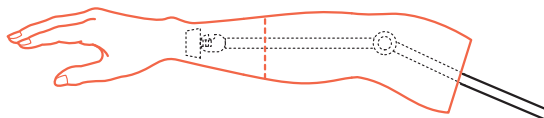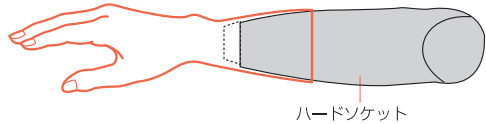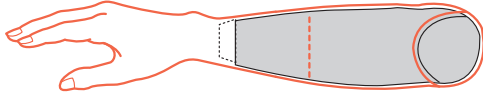製品番号	佐藤 5-44W	製品名	シルグローブ 木部付手掌	内容	指芯入り、軟性発泡樹脂入、手関節木部付
仕様	骨格式手掌			骨格式 前、上腕部カバー付手掌	
見積例	佐藤5-44W (骨格式用)			佐藤5-44W+佐藤2-452	
参考図					
仕様	殻構造用手掌			殻構造用 前腕部カバー付手掌	
見積例	佐藤5-44W (殻構造用)			佐藤5-44W+佐藤3-452	
参考図					

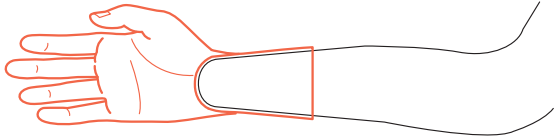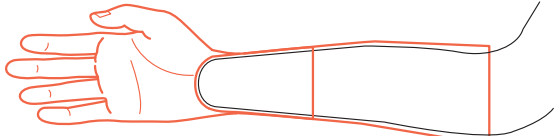

ハードソケットなし直接患部差込用

製品番号	佐藤 5-40	製品名	シルグローブ 差込式手掌	内容	指芯入り、軟性発泡樹脂入 シリコンインナーソケット入
適 応	手関節離断レベルの差込式義手		手関節離断レベルの差込式義手		
見 積 例	指芯の場合：佐藤5-40 パッシブフィンガー入りの場合：(+佐藤4-8P5)		佐藤5-40+佐藤3-452 パッシブハンドインナー入りの場合：(+佐藤5-8P)		
参 考 図					

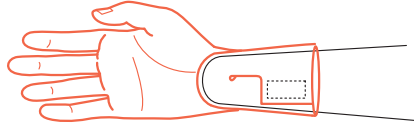手 袋 式

製品番号	佐藤 4-45	製品名	シルグローブ 全指 手袋式	内容	指芯入、マジック付、軟性発泡樹脂入、 シリコンインナーソケット入
適 応	手関節離断レベルの手袋式手部義手				
見 積 例	指芯の場合：佐藤4-45 パッシブフィンガー入りの場合：佐藤4-45+佐藤4-8P5				

カ バ ー

製品番号	佐藤 2-452	製品名	シルグローブ 前、上腕部カバー	内容	シリコンカバーのみ 肘関節から近位15cmまで
適 応	上腕義手部分				
見 積 例	佐藤5-44、佐藤5-44R、佐藤5-44W、佐藤5-40に接着できます				
製品番号	佐藤 3-452	製品名	シルグローブ 前腕部カバー	内容	シリコンカバーのみ 顆上支持式 ミュンスタータイプ及びノースウエスタンタイプまで
適 応	前腕義手部分				
見 積 例	佐藤5-44、佐藤5-44R、佐藤5-44W、佐藤5-40に接着できます				

※手部義手で断端が大きく、手首より遠位切断の場合はフルオーダーになり金額が上がります。フルオーダー製品は完成用部品価格表には掲載されていません。


〈注意事項〉

原材料のシリコンは、当社独自の高強度仕様になっていますが性質上多少裂けやすいこともあります。指の付け根など応力が集中する場所では、内部の指芯が折れると表面のグローブまで破れてきますので指の過度な曲げ伸ばしは避けて下さい。尚、破れの修理はできますのでお申し付け下さい。シリコンは摩擦係数が高く滑りにくくなっています。物を押さえたり、操作する時は便利ですが服の袖を通す時などは多少引っかかる場合があります。

シルグローブサイズ一覧表

■既製品シルグローブサイズ表 (mm) (5-44, 5-44R, 5-44W, 5-40, 4-45)

	A(中指PIP周径)	B(MP周径)	C(リスト周径)	D(上縁周径)	E(全長)	F
女 M1	58	175	142	185	280	95
女 L1	60	183	150	190	300	100
女 L2	58	175	143	185	280	100
男 S1	66	185	153	200	300	96
男 M1	65	194	160	210	300	98
男 M2	65	198	155	210	300	100
男 L1	70	213	165	210	300	107
男 L2	67	205	160	210	300	110

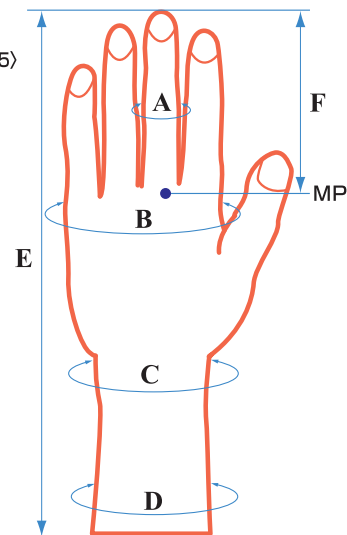


■既製品シルグローブ回転器サイズ表

ハードソケットを製作される場合は、以下の表を参考にして下さい。



(内回転)

種類	直径	Z (ソケット内径) (mm)
女 M1		38
女 L1		38
女 L2		38
男 S1		43
男 M1		43
男 M2		43
男 L1		44
男 L2		44

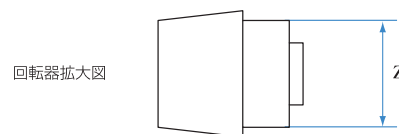

(外回転)

種類	直径	Z (ソケット内径) (mm)
女 M1		43
女 L1		43
女 L2		43
男 S1		48
男 M1		48
男 M2		48
男 L1		49
男 L2		49

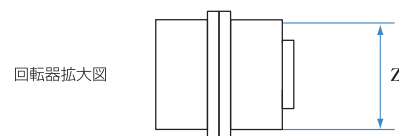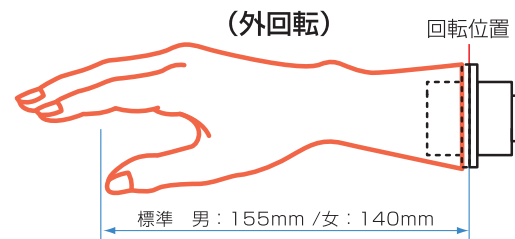

塩ビ製品グローブサイズ一覧表

■塩ビ製品グローブサイズ表 (mm)

種類		A (中指PIP周径)	B (MP周径)	C (リスト周径)	D (上縁周径)	E (全長)	F
女 S1	ノーマルグローブ	60	158	128	150	250	94
	カラーグローブ	60	157	125	150	250	92
女 M1	ノーマルグローブ	55	175	146	190	240	92
	カラーグローブ	55	170	142	190	240	90
女 M3	ノーマルグローブ	55	170	153	220	360	98
	カラーグローブ	55	160	149	220	360	96
女 L1	ノーマルグローブ	60	177	160	185	270	104
女 L2	ノーマルグローブ	60	170	138	165	260	103
	カラーグローブ	60	170	136	165	260	102
女 L3	ノーマルグローブ	60	175	153	210	300	100
	カラーグローブ	55	174	151	200	300	99
男 S1	ノーマルグローブ	60	184	150	200	240	96
	カラーグローブ	53	182	146	185	240	94
男 M1	ノーマルグローブ	64	206	158	205	300	103
	カラーグローブ	63	190	158	200	300	96
男 M2	ノーマルグローブ	65	200	155	190	240	105
	カラーグローブ	65	190	153	180	240	102
男 L1	ノーマルグローブ	70	220	180	240	310	110
	カラーグローブ	70	214	173	250	310	108
男 L3	ノーマルグローブ	70	200	158	215	270	112
	カラーグローブ	70	194	152	210	270	106
男 L4	ノーマルグローブ	70	210	168	250	380	114
	カラーグローブ	70	206	163	230	380	112




■塩ビ製品用回転器サイズ表


(内回転)

種類	直径	Z (ソケット内径) (mm)
女S1・L2		38
女L3		41
女M1・M3・L1		43
男S1・M1・M2		43
男L2・L3		47
男L1		51

(外回転)

種類	直径	Z (ソケット内径) (mm)
女S1・L2		43
女L3		46
女M1・M3・L1		48
男S1・M1・M2		48
男L2・L3		52
男L1		56

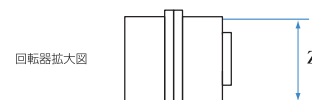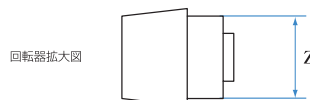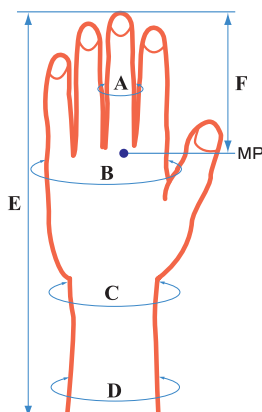

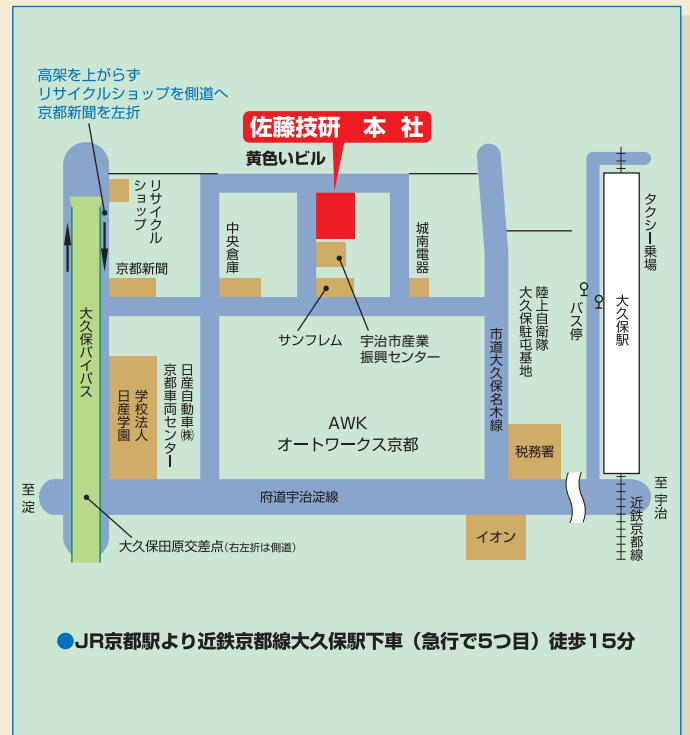

●JR京都駅より近鉄京都線大久保駅下車(急行で5つ目) 徒歩15分



株式会社 佐藤技研

〒611-0033
京都府宇治市大久保町西ノ端1-18 TEL.(0774)48-1151 FAX.(0774)46-1635
URL:<http://www.satogiken.jp> e-mail:info@satogiken.jp